

OROCID – MULTISEPT plus, ново име OROLIN – MULTISEPT plus

ПРОДУКТ:	OROLIN – MULTISEPT plus Дезинфекциращ и почистващ концентрат за инструменти, борери и ендодонтски инструменти. Силно почистващо действие. Съдържа инхибитори на корозията (съдържа вещества, предпазващи инструмента от корозия). Без алдехиди, фенол и корозивни амониеви хлориди.
УПОТРЕБА:	За дезинфекция на инструменти използвайте 2% воден разтвор за 5 минути, 4% разтвор за 2 минути или 5% за 1 минута. Убедете се, че повърхността на обектите е напълно покрита от разтвора и че не е останал въздух в кухините на инструмента. Дръжте инструмента разглобен. След дезинфекция предметите да се изплакнат обилно с вода. (За последното изплакване се препоръчва дестилирана вода). Препаратът е подходящ за употреба в ултразвукови вани за почистване и дезинфекция. Подновявайте разтвора два или три пъти седмично в зависимост от степента на замърсеност на инструмента. Препоръчва се всекидневна смяна на използвания разтвор. Не се препоръчва за закалени и алуминиеви части на инструментите.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:	<ul style="list-style-type: none"> • Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM) 2% / 5 мин • Туберкулоцидно (DGHM) 2% / 5 мин • Хепатит В вкл. HIV 2% / 5 мин • Хепатит С 2% / 5 мин • Коронавирус (SARS) 2% / 5 мин • Адено вирус 2% / 5 мин • Antibiotig-resistant yeasts 2% / 5 мин • Enveloped viruses 2% / 5 мин • BVDV 2% / 5 мин • Herpes simplex virus 2% / 5 мин • Influenza A virus 2% / 5 мин • Vaccinia virus 2% / 5 мин • Non-enveloped viruses 2% / 15 мин • Norovirus 2% / 10 мин • Poliovirus 2% / 15 мин
СЪСТАВ:	9,1 g Alkylamine, 3,6 g dialkyldimethylammonium chloride, помощни вещества
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:	Прозрачна синя течност с характерен аромат. pH: концентрат: ca. 12.5 2% разтвор: ca. 11
ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:	плътност (20°C) ca. 1,02 g/ml LD ₅₀ – Стойност: >1500 mg/kg /1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ:	CE 0483 Germany: DGHM listed
СРОК НА ГОДНОСТ:	36 месеца от датата на производство.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:	R34 Причинява изгаряне S2 Да се пази от деца S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ . S28 При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. S37/39 При работа с препаратите да се носят специални предпазни ръкавици, очила/маски за лице. S46 При поглъщане незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
ОПАКОВКИ:	1 литър, 2 литра, 5 литра
УСЛОВИЯ НА	Инструкции за безопасно поддържане
СЪХРАНЕНИЕ:	-Инструкции за защита срещу пожар и експлозия: Продуктът не е възпламеним. Изисквания за избора на складово помещение и контейнера Планирайте подово покритие, устойчиво на алкални разтвори. Да се използват нетечещи съдове, поставени на земята. Съхранение заедно с други продукти -Допълнителни напътствия за условията на съхранение: Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте при стайна температура.

Дентално депо Булад Дент , гр.София, ул. „Николай Коперник“ 44, тел. 02/971 48 41, 02/971 48 44

www.buladdent.com
bulad@mreja.net

04.2019 год.