

## **OROLIN Burbath**

### **ПРОДУКТ:**

#### **OROLIN Burbath**

Готов за употреба дезинфекционен продукт за ротиращи инструменти, изработени от неръждаема стомана, волфрамов карбид, диамантено зърно, керамика, полимер и силикон, като борери, диамантени пилители и полиращи инструменти. Без алдехиди. Биоразграждащ се.

### **УПОТРЕБА:**

Готов разтвор за директна употреба. След дезинфекцията не изплаквайте борерите с вода, а ги оставете да изсъхнат. Не използвайте за дезинфекция на алуминиеви, медни или цветно означени инструменти. Използвайте само за алкохол-съвместими материали. Препоръчва се смяна на разтвора всяка седмица или по-често в зависимост от степента на замърсяване.

### **СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:**

• Bactericidal	30 seconds
• Antibiotic-resistant bacteria	30 seconds
• Tuberculocidal	60 seconds
• Mycobactericidal	60 seconds
• Yeasticidal	30 seconds
• Antibiotic-resistant yeasts	30 seconds
• Fungicidal	60 seconds
• Enveloped viruses	15 seconds
• BVDV	15 seconds
• Coronavirus	15 seconds
• Hepatitis B virus	15 seconds
• Hepatitis C virus	15 seconds
• Herpes simplex virus	15 seconds
• HIV	15 seconds
• Influenza A virus	15 seconds
• Vaccinia virus	15 seconds
• Non-enveloped viruses	30 seconds
• Adenovirus	30 seconds
• Norovirus	30 seconds
• Poliovirus	30 seconds
• Polyomavirus	30 seconds

### **СЪСТАВ:**

32 g isopropanol, 0.7 g phenoxyethanol, 0.2 g quaternary ammonium compounds, alkali, corrosion inhibitors, surfactants

### **ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:**

Прозрачна, безцветна или светло жълта течност с характерен аромат.

Плътност 0,96 g/ml

PH ~ 14

Запалимост- Продуктът е запалим

**РЕГИСТРАЦИЯ:**  
**СРОК НА ГОДНОСТ:**

CE 2460  
36 месеца от датата на производство.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:**

R10 Запаливо. R36/38 Дразни кожата и очите. S2 Да се пази от деца. S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши! S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. S28 При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. S37/39 При работа с препаратите да се носят специални предпазни ръкавици, очила/маски за лице. S46 При поглъщане незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

**ОПАКОВКИ  
УСЛОВИЯ НА  
СЪХРАНЕНИЕ:**

1 литър, 2 литра, 5 литра,  
**Инструкции за безопасно поддържане**  
Използвайте устойчиво на спирт оборудване.  
**Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:**  
По време на работа с продукта може да се отделят запалими летливи компоненти. Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха. Не пушете - дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване.  
**Изисквания за избора на складово помещение и контейнера**  
-  
**Инструкции за съхранение заедно с други продукти**  
-  
**Допълнителни напътствия за условията на съхранение:**  
Дръжте контейнера плътно затворен.  
Съхранявайте при стайна температура.