

DENTIRO Wipes

ПРОДУКТ:

DENTIRO WIPES

Почистващи и дезинфекциращи кърпички за малки повърхности, инструменти, медицинско оборудване и повърхностите на стоматологичните участъци. Без алдехиди.

УПОТРЕБА:

Отворете пълнителя и го поставете в контейнера. Издърпайте първата кърпичка през отвора на капака. Навлажнете напълно повърхностите и обектите с кърпичките и изчакайте да подейства. Използвайте само върху алкохол-съвместими материали. Затваряйте кутията след употреба.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

• Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM)	60 секунди
• Туберкулоцидно	60 секунди
• Хепатит В вкл. HIV	30 секунди
• Хепатит С	15 секунди
• Коронавирус (SARS)	30 секунди
• Antibiotic-resistant bacteria	60 секунди
• Enveloped viruses	30 секунди
• BVDV	15 секунди
• Herpes simplex virus	15 секунди
• Influenza A virus	15 секунди
• Vaccina virus	30 секунди
• Non-enveloped viruses	60 секунди
• Adenovirus	60 секунди
• Bovine enterovirus	60 секунди
• Norovirus	60 секунди
• Poliovirus	60 секунди
• Rotavirus	30 секунди

СЪСТАВ В 100 г.:

31,3g ethanol, 16,7g izopropanol

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

Прозрачна безцветна течност с характерен алкохолен аромат.
Точка на Възпламеняване: 22°C (DIN 51 755)

плътност (20°C) ~0,915 g/ml (g/cm³)

ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

LD₅₀ – Стойност: >5000 mg/kg
/1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ:

CE 0483

Germany: DGHM listed

**СРОК НА
ГОДНОСТ:**

36 месеца от датата на производство.

**ПРЕДПАЗНИ
МЕРКИ:**

R10 Запалимо. S2 Да се пази от деца S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши S 24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите Съхранявайте на сухо и проветриво място.

**ОПАКОВКИ:
УСЛОВИЯ НА
СЪХРАНЕНИЕ:**

120 кърпички в опаковка

Инструкции за безопасно поддържане

-

Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:

По време на работа с продукта може да се отделят запалими летливи компоненти.

Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха.

Дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. Не пушете.

Изисквания за избора на складово помещение и контейнера

-

Допълнителни напътствия за условията на съхранение:

Дръжте контейнера плътно затворен.

Съхранявайте при стайна температура.