



### Инструкция за преносим дентален юнит- А-31, А-33

1. Преди използване и подготовка
  - 1.1 Проверете външната страна на устройството и поставете на стабилна основа. Уверете се, че всички части са в нормално състояние, включете захранващия кабел в контакта и към устройството. Отворете капака, проверете бутоните, манометрите, трипътните ръкохватки, тръбите на наконечниците както и техните държачи, проверете дали има някаква повреда. Ако има нещо неправилно, моля свържете се на време с местния дистрибутор или с производителя.
  - 1.2 Напълнете бутилката с дестилирана вода; поставете я на правилното място.  
Предупреждение: не се допускат течове върху машината.
  - 1.3 Сложете педала за контрол на земята
  - 1.4 Включете. Компресорът/моторът работи и ще спре когато налягането достигне 0,8 МПа. Машината е готова по всяко време за работа.
2. Инструкция за експлоатация на отделните части.
  - 2.1 Турбина.

Първо, инсталирайте турбината, за да започне използването на машината чрез педала за контрол. Междувременно, моля внимавайте за левия манометър който показва налягането. Работното налягане за турбина обикновено трябва да е 0,22 МПа.

В случай, че манометърът показва налягане по-високо от 0,22 МПа завъртете кранчето за налягане на турбината на лявата страна за да регулирате исканото налягане. Ако налягането е по-ниско от 0,22 МПа тогава завъртете надясно за да регулирате.

Изискване на функцията за водна пулверизация. Моля първо отворете ключа на бутилката за вода и след това с кранчето се регулира водата и другото кранче на пулверизацията. За да спре завъртете надясно кранчето за вода.

Внимание: не отваряйте кранчето на бутилката за вода или кранчето на пулверизацията; в противен случай водата ще се пръсне навън.
  - 2.2 Наконечник.

Може да бъде отнесено към работа с турбина, но работното налягане за наконечника е 0,32 МПа.
  - 2.3 Трипътна ръкохватка.

Тя може да работи директно без контрол от крака. Трябва само да се натисне „air-jet” бутона за стартиране.
  - 2.4 Всмукателна система.

Просто я извадете от скобите за работа. Сложете я обратно на правилното място след работа. Моля внимавайте за белия маркуч отзад; той е водещ за всмукателната система. Трябва да пригответе контейнер за конденза.
  - 2.5 Илюстрация на бутоните.
    - ключ за пулверизация
    - манометър за наконечник
    - манометър за помпа
    - ключ за наконечник
    - ключ за вода
    - ключ за бутилка
3. Забележки.
  - 3.1 Внимание за клапана за регулиране на налягането на контрол панела на машината, налягането е 0,5 – 0,6 МПа нагласено от производителя. Не движете този клапан както вие желаете, или юнита не може да работи нормално когато налягането е прекалено високо, и вие ще повредите тръбите на наконечника или други компоненти.
  - 3.2 След употреба, изключете захранването, и още веднъж натиснете педала за контрол за да се освободи всички остатъчен газ в мотора на машината и другите тръби. Уверете се че налягането на наконечниците и налягането на компресора са нула. Ако не, машината ще се повреди в резултат на дългосрочно налягане на остатъчен газ.

#### 4. Спецификации и стандартни аксесоари.

Захранване:	220V/110V	50 Hz/60 Hz
Мощност:	350W	
Въздушен поток	40L/Min	
Стартово налягане:	0,5 MPa	
Максимално налягане:	0.8 MPa	
Работно налягане за турбината:	0,34 MPa	
Работно налягане за наконечник:	0,32 MPa	
Шум:	40 – 45 dB	
Нето тегло:	14 kg	
Размери:	370*320*320 (MM)	

#### Стандартни аксесоари:

- Всмукателна система: 1 комплект
- Автоматично заредена въздухо захранваща система: 1 комплект
- Тръба с четири дупки за наконечник:
- Кръгъл педал за контрол: 1 бр.
- Трипътна ръкохватка: 1 бр.
- Бутилка за чиста вода 600 ml: 1 бр.

#### Опционални аксесоари:

- Светлина
- Ръчна количка
- Турбина
- Наконечник

#### 5. Пояснение.

Този тип преносим дентален юнит с компресор който може да работи директно без да изисква никакъв резервоар за съхранение на въздух. Със стабилен източник на чист въздух, няма проблем с конденза както при традиционния компресор с резервоар. Лесен е за работа. Също предоставя устойчиво налягане за турбината, наконечника и друго оборудване като дентален скалер, фотополимерна лампа и др. но тежи само 14 КГ. Удобен е за носене. Трябва да бъде първият избор на зъболекар който трябва да дава спешна помощ.

#### 6. Гаранция.

Гаранция, една година период на валидност

В случаите по-долу не е под гаранция

А. Повреда причинена от човешка грешка

В. Повреда причинена от неподходяща работа

С. Повреда причинена от неспазване изискванията за работа в инструкцията

Дентално депо Булад Дент , гр.София, ул. „Николай Коперник“ 44, тел. 02/971 48 41, 02/971 48 44

[www.buladdent.com](http://www.buladdent.com)

[bulad@mreja.net](mailto:bulad@mreja.net)

04.2019 год.