

DENTIRO Wipes

ПРОДУКТ:

DENTIRO WIPES

Почистващи и дезинфекциращи кърпички на алкохолна основа, предназначение за дезинфекция на малки повърхности, инструменти, медицинско оборудване и повърхностите на стоматологичните участъци. Без алдехиди. Дерматологично тествани

УПОТРЕБА:

Навлажнете напълно повърхностите и обектите с кърпичките и изчакайте да подейства. Използвайте само върху алкохол-съвместими материали. Затваряйте кутията след употреба. Препоръка за употреба на контейнер за съхранение на кърпичките (не е задължително): Отворете пълнителя и го поставете в контейнера. Издърпайте първата кърпичка през отвора на капака.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Спектър на действие	Време за действие:
Бактерицидно	15 секунди
Антибиотик-резистентни бактерии	15 секунди
Туберкулоцидно	60 секунди
Микобактерицидно	60 секунди
Спороцидно	15 секунди
Антибиотик-резистентни спори	15 секунди
Вируси с обвивка	15 секунди
BVDV	15 секунди
Коронавирус	15 секунди
Хепатит В вирус	15 секунди
Хепатит С вирус	15 секунди
Херпес симплекс вирус	15 секунди
ХИВ	15 секунди
Инфлуенца А вирус	15 секунди
Vaccinia virus	15 секунди
Вируси без обвивка	60 секунди
Адено вирус	60 секунди
Норо вирус	60 секунди
Полио вирус	60 секунди
Ротавирус	30 секунди

В съответствие с EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615 и RKI/DVV. Дерматологично тествани.

СЪСТАВ В 100 г.:

31,3g ethanol, 16,7g isopropanol

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

Кърпи, напоени с прозрачна безцветна течност с характерен алкохолен аромат. Точка на възпламеняване: 22°C (DIN 51 755)

плътност (20°C) ~0,915 g/ml (g/cm³)

ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

LD₅₀ – Стойност: >5000 mg/kg
/1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ:	CE 0483	Germany: DGHM listed
СРОК НА ГОДНОСТ:	36 месеца от датата на производство.	
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:	R10 Запалимо. S2 Да се пази от деца S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши S 24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите Съхранявайте на сухо и проветриво място.	
ОПАКОВКИ: УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:	<p>120 кърпички с размер 14,5 см x 20 см, в плик</p> <p>Инструкции за безопасно поддържане</p> <p>-</p> <p>Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:</p> <p>По време на работа с продукта може да се отделят запалими летливи компоненти.</p> <p>Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха.</p> <p>Дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. Не пушете.</p> <p>Изисквания за избора на складово помещение и контейнера</p> <p>-</p> <p>Допълнителни напътствия за условията на съхранение:</p> <p>Дръжте контейнера плътно затворен.</p> <p>Съхранявайте при стайна температура.</p>	