

ORO CLEAN plus

ПРОДУКТ:

ORO CLEAN plus

Високо ефективен почистващ концентрат за всички аспирационни уредби, плювалници. Непенлив.

УПОТРЕБА:

Използвайте 2% разтвор. В края на всеки работен ден прекарайте по 1 литър от 2% разтвор през аспирационната уредба и изсипете един литър в плювалника. Оставете да подейства. Препоръчително е аспирационната уредба да се изплаква обилно с вода преди дезинфекцията и след хирургически манипулации. Благодарение на специалните си съставки разтваря кръв и белтъчни вещества.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

- Бактерии и гъбички 2% / 30 минути
- Хепатит В/ HIV 2% / 30 минути
- Хепатит С 2% / 5 минути

СЪСТАВ В 100г:

5г benzalkonium chloride, антипенливи агенти, специални помощни вещества.

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

Прозрачна жълта течност с приятен аромат .

pH : концентрат: 10.0 – 12.0
2% разтвор: 9.0 – 11.0

Плътност: 1,04 g/ml

ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

LD₅₀ – Стойност: >5000 mg/kg
/1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ:

CE 0483 0483 Germany: DGHM listed

СРОК НА ГОДНОСТ:

36 месеца от датата на производство.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

R36/38 Дразни кожата и очите. S2 Да се пази от деца S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ S28 При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. S37/39 При работа с препарата да се носят специални предпазни ръкавици, очила/маски за лице. S45 В случай на инциденти или при прилошаване незабавно потърсете лекарска помощ (при възможност покажете етикета)

ОПАКОВКИ:

2 литра, 5 литра

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Инструкции за безопасно поддържане

-

Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:

Продуктът не е възпламеним.

Изисквания за складовото помещение и съда на съхранение

Планирайте изолиращо подово покритие.

Допълнителни напътствия за условията на съхранение:

Дръжте контейнера плътно затворен.

Съхранявайте при стайна температура.

Дентално депо Булад Дент , гр.София, ул. „Николай Коперник“ 44, тел. 02/971 48 41, 02/971 48 44