

## ASEPTOPRINT Liquid

<b>ПРОДУКТ:</b>	<b>ASEPTOPRINT Liquid</b> Дезинфекциращ и почистващ концентрат за всички видове отпечатъчни материали като полиетер, полисулфид, алгинати, силикони, както и за ортодонтски артикули (по смисъла на директива 93/42/ЕЕС). Без алдехиди.
<b>УПОТРЕБА:</b>	За дезинфекция използвайте 1% воден разтвор за 2 минути или 0,5% разтвор за 4 минути. При по-голямо замърсяване използвайте 2% разтвор за 2 минути или 1% разтвор за 10 минути. Уверете се, че материалът е потопен изцяло и че не е останал въздух в кухините на инструмента. След дезинфекция изплакнете обилно с вода (За последното изплакване се препоръчва дестилирана вода). Препоръчва се всекидневна смяна на използвания разтвор в зависимост от степента на замърсяване. Да се спазват посочените концентрации и времетраене. Неподходящ за части от алуминий.
<b>СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бактерицидно, фунгицидно (DGHM) <span style="float: right;">1% \ 2 min 3% \ 1 min</span></li> <li>• HBV, HCV, HIV <span style="float: right;">1% \ 2 min 3% \ 1 min</span></li> <li>• Хепатит С <span style="float: right;">1% \ 1 min</span></li> <li>• Vaccinia virus <span style="float: right;">1% \ 2 min 3% \ 1 min</span></li> <li>• Enveloped viruses <span style="float: right;">1% \ 2 min 3% \ 1 min</span></li> <li>• BVDV <span style="float: right;">1% \ 1 min</span></li> <li>• Herpes simplex virus <span style="float: right;">3% \ 1 min</span></li> <li>• influenza A virus <span style="float: right;">3% \ 3 min</span></li> <li>• Rotavirus <span style="float: right;">3% \ 1 min</span></li> </ul>
<b>СЪСТАВ ЗА 100г:</b>	30.0g benzalkonium chloride, surfactants, помощни вещества
<b>ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:</b>	Прозрачна, жълта течност с характерен аромат. Плътност при 20°C – ca. 1,0 g/ml РН концентрат: ca. 12,6 2% : ca. 10,7
<b>ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:</b>	LD <sub>50</sub> – Стойност: >1000 mg/kg /1/2 летална доза/

<b>РЕГИСТРАЦИЯ:</b>	CE
<b>СРОК НА ГОДНОСТ:</b>	36 месеца от датата на производство
<b>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:</b>	R22 Опасен при поглъщане. R34 Дразни кожата. S2 Да се пази от деца S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. S28 При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. S37/39 При работа с препаратите да се носят специални предпазни ръкавици, очила/маски за лице. S46 При поглъщане незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
<b>ОПАКОВКИ:</b>	1 ЛИТЪР
<b>УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:</b>	<b>Инструкции за безопасно поддържане</b> - <b>Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:</b> Продуктът не е възпламеним. Изисквания за складовото помещение и съда на съхранение <b>Изисквания за избора на складово помещение и контейнера</b> Планирайте подово покритие, устойчиво на алкални разтвори. Да се използват нетечащи съдове, поставени на земята. <b>Съхранение заедно с други продукти</b> - <b>Допълнителни напътствия за условията на съхранение:</b> Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте при стайна температура.