



ALFRED BECHT GMBH



Asphalin В таблетки

Контактът между влагата от въздуха и Асфалин В таблетки ще образува антибактериална формалдехидна атмосфера в затворен съд. Този процес протича за около 6 часа. По този начин предварително стерилизираните инструменти ще бъдат защитени от повторно бактериално заразяване.

Начин на приложение: Постави стерилните инструменти в добре затворен съд и добави една таблетка Асфалин В. Ние препоръчваме използването на петрита. Температурата на съхранение не трябва да пада под 20°C. Увеличаването на влажността на въздуха (>50%) ще засили ефекта на таблетките. Да не се отваря съда преди необходимостта от използването на инструментите.

Поднови таблетката след 2 седмици.

Оценка на риска: Когато използваш Асфалин В таблетки носи удобно защитно облекло, ръкавици и защитни очила. Да не се вдишват парите.

Да се използват проветриви помещения.

В случай на лоша вентилация носи подходяща маска. Пази от контакт с очите и кожата. При инцидент промий веднага обилно с вода и потърси медицинска помощ.

В случай на поглъщане не предизвиквай повръщане. Потърси медицинска помощ спешно и покажи опаковката

или етикета на продукта.

При увреден блистер, той трябва да се унищожи съгласно официалните разпоредби.

Да не се използват Асфалин В таблетки в случай на доказана хиперсензитивност към една от съставките.

Винаги отбелязвай серийния номер за идентификация на продукта.

Пази съда плътно затворен и далеч от достига на деца.

Само за професионална употреба.

Съхранение: Да не се нагряват Асфалин В таблетките.

Да се използват преди изтичане срока на годност.

Състав: Параформалдехид, тимол, камфор, пълнители

Производител: Alfred Becht GmbH, Germany

Вносител: Булад Дент ООД, гр. София, ул. "Н.Коперник" №44

тел. (02) 971 48 44 магазин: бул. „Цариградско шосе“ №89

