

## **OROLIN Burbath**

**ПРОДУКТ:** **OROLIN Burbath**  
 Готов за употреба дезинфекционен продукт за ротиращи инструменти като борери, диамантени пилители и полиращи инструменти. Без алдехиди. Биоразграждащ се.

**УПОТРЕБА:** Готов разтвор за директна употреба. След дезинфекцията не изплаквайте борерите с вода, а ги оставете да изсъхнат. Не използвайте за дезинфекция на алуминиеви, медни или цветно означени инструменти. Използвайте само за алкохол-съвместими материали. Препоръчва се смяна на разтвора всяка седмица или по-често в зависимост от степента на замърсяване.

### **СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:**

Бактерицидно	30 секунди
Антибиотик-резистентни бактерии	30 секунди
Туберкулоцидно	60 секунди
Микобактерицидно	60 секунди
Дрождецидно	30 секунди
Антибиотик-резистентни дрожди	30 секунди
Фунгицидно	60 секунди
Суперкапсидни вируси	15 секунди
BVDV	15 секунди
Коронавирус	15 секунди
Хепатит В	15 секунди
Хепатит С	15 секунди
Херпес симплекс	15 секунди
HIV	15 секунди
Инфлуенца А	15 секунди
Вакциния вирус	15 секунди
Вируси без обвивка	30 секунди
Аденовирус	30 секунди
Норовирус	30 секунди
Полиовирус	30 секунди
Полиомавирус	30 секунди

**СЪСТАВ:** 32g 2-propanol, 0.7 g phenoxyethanol, 0.2g quaternary ammonium compounds, alkali, corrosion inhibitors, surfactants.

**ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:** Прозрачна, безцветна или светло жълта течност с характерен аромат.  
 Плътност при 20°C – 0,955 g/ml  
 PH ~14  
 Точка на възпламеняване: 22°C

**ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:** LD<sub>50</sub> – Стойност: >5000 mg/kg  
 /1/2 летална доза/

<b>РЕГИСТРАЦИЯ:</b>	CE 0483 Germany: DGHM listed
<b>СРОК НА ГОДНОСТ:</b>	36 месеца от датата на производство.
<b>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:</b>	R10 Запалимо. R36/38 Дразни кожата и очите. S2 Да се пази от деца. S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши! S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. S28 При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. S37/39 При работа с препаратa да се носят специални предпазни ръкавици, очила/маски за лице. S46 При поглъщане незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
<b>ОПАКОВКИ:</b>	1 литър, 2 литра, 5 литра, 10 литра
<b>УСЛОВИЯ НА</b>	<b>Инструкции за безопасно поддържане</b>
<b>СЪХРАНЕНИЕ:</b>	Използвайте устойчиво на спирт оборудване. <b>Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:</b> По време на работа с продукта може да се отделят запалими летливи компоненти. Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха. Не пушете - дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. <b>Изисквания за избора на складово помещение и контейнера</b> - <b>Инструкции за съхранение заедно с други продукти</b> - <b>Допълнителни напътствия за условията на съхранение:</b> Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте при стайна температура.